

# Ортопедия

## Заливка альгинатного слепка

1. Промываем слепок от слюны под проточной водой
2. Вытряхиваем воду из слепка и продуваем, чтобы не осталось капелек воды
3. Наливаем воды без соли, примерно 2/5 колбы на 2 слепка.
4. Насыпаем гипс, чтобы он сам впитался.
5. Сначала перемешиваем, а потом быстро растираем по колбе, до сметанообразной консистенции.
6. Начинаем заливку с края ложки или с центра.(Используя вибростол или при его отсутствии, простукивая гипс по слепку чтобы убрать пузырьки воздуха)
7. Важно: чтобы гипс затекал в каждый зуб отдельно при вибрации, иначе могут быть поры.
8. После переворачиваем (НЕ НАДАВЛИВАЯ СВЕРХУ) и формируем края, с небольшим избытком по краю слепка.
9. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на следующие места: бугры В/Ч и ретромолярные области Н/Ч.
10. Вскрывать модель надо через 30 мин - 2 часа.Важно не забыть альгинатный слек с гипсом более этого времени, в противном случае слепок сжимается и гипсовая модель очень плохо отходит от слепка
11. Обрезка на тримере, когда высохнет или подсушить в печке (инструкция приклеена около печки в КАД-КАМной).

**Колба оставляется с остатками гипса до затвердевания, жидкий гипс в раковину не выливать.**

**Стараться, чтобы весь гипс уходил на заливку, т.е. замешивать с разумным запасом чтобы потом не оставалось половины колбы с гипсом лишними.**

Уникальный ID ответа: #1326

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-13 22:21