

Чистка + отбеливание

Чистка + отбеливание

Особенности работы Аэрофлоу

1. Для работы аэрофлоу используется 2 шланга.
2. ВОДА - тонкая трубка около средней трубочки.
3. Воздух - средняя трубка.
4. Воздушная обработка и воздух спрей, не используется!!!
5. Во всех наконечниках стоит обратный клапан на воздух, если он ломается, т забрасывается обратно в шланг вместе с песком. Поэтому ВАЖНО, чтобы после р наконечниках. Если есть, то наконечник оформить в Ремонт Бутенко, и шлангами не
6. Максимальное давление в аэрофлоу 2,7.
7. Большое давление травмирует десну и эмаль зубов. Происходит перерасход порош
8. Моют аэрофлоу санитарочки в ЦСО, т.к. у мс нет возможности ждать 15 м разрушаться. Если в ЦСО никого нет, то моет мс или асс.
9. ??? Если делаешь аэрофлоу на камни, то пересушиваешь эмаль, появляется ч убираешь камни скалером, то опять надо допроходить аэрофлоу, это доп. чувств аэрофлоу!!!

Количество Аэрофлоу

1. Имеется Серые КИТАЙ.
2. Серые 15 штук хранятся в отдельных коробках в чистой зоне ЦСО.

Состав наборов

Серый	15 наборов	1 с
-------	------------	-----

Уникальный ID ответа: #1372

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-05-22 15:04