

Алгоритмы работы. Этап 1

Утренняя уборка

Утро

- 1 Поставить телефон на вибрацию.
- 2 Просмотреть запись на день, если пациентов нет, то встать к др. доктору,
- 3 Взять стер эндодонию из ЦСО, ящик с инструментами+индивидуальные на
- 4 Проверить стерильный шкаф на соответствие содержания наклейкам на я
- 5 С 8.20 до 8.40 получить со склада необходимый материал в кабинет и в ли

В КАБИНЕТЕ в 8.20

- 1 Включить рециркулятор, убедиться, горит лампа голубым цветом внутри.
- 2 Проверить исправность локтевого дозатора и наличие дез раствора в нем.
- 3 Протереть все поверхности кабинета: Мед.шкаф, диспенсер, 2 стула, рециркул
- 4 В столе врача в первом ящике наличие неотложной помощи, пособие для врач

УСТАНОВКА

Протереть стенку у плевательницы
Протереть кресло, педаль со шлангом, 2 шланга и подножку.
Поставить педаль под ногу врача (убрать педаль из-под устан
Включить кресло (кнопка справа снизу).
Проверить механизм установки нажав вправо, влево, верх и н
посторонних звуков), установить в среднее положение.
Слить воду в плевашку без стакана, после стакан вернуть на
Пылесос и слюноотсос чистый, новый, работоспособный.
Пластмассовый язычок не западает.
Жужжит, пластмассовый язычок не западает.
Идет вода, воздух.
Вода идет, пластмассовый язычок не западает.
Лампа и 2 ручки чистые. Лампа горит.

Турбинка
Угловой
Пустер
Скалер

ШКАФ

Снять с зарядки все оборудование и поставить на стол с раковиной, р
Проверить соответствие оборудования кабинету по Ч/Л на стене.
Х- смарт Поставить на стол с раковиной, включить, нажать на кнопку окончечн
(работает рот. Группа).
Гуттакат Гуттакат положить во второй ящик тумбочки и проверить нажатием к
Пикси Проверить работу , включить нажав на кнопку, услышать сигнал.
Проверить работу световой лампы, нажать на кнопку, (горит синий це
ящик тумбочки.
Поставить на стол с раковиной бокс резерва и пересмотреть на наличч
шкаф.

ТУМБОЧКА (смешанная)

Алгоритмы работы. Этап 1

Проверить наличие эндодонтии в боксе доктора.

Подвинуть тумбочку к креслу. Проверить чтобы перчатки соответство

На столе по инструкции.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й ящики по инструкции, чашки Петри.

Гуттакат положить во второй ящик тумбочки и проверить нажатием к

Проверить наличие бонда и смолы (встряхнуть).

Надеть канюли на жидкотекучие (травекс, . ж/коффердам, тетрик-н-ф
шприц).

Стерильный шкаф по чек листу проверить (на стене).

Если работает кабинет только в первую смену, то делать вечернюю об

Поддерживать чистоту в кабинете.

Снять с зарядки телефон для фото №2

Снять с зарядки вспышку от телефона (2 шт.)

Достать телефон №2 для фото из шкафа, закрепить телефон на стойк
тумбочку

Уникальный ID ответа: #1320

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-07 14:37