

**Алгоритмы работы. Этап 1**  
**Инструкция №12**  
**Обработка кабинета после пациента**  
**Вечерняя уборка**  
**1. УБОРКА ГЯЗНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ**

1.1 Надеть перчатки.

1.2 Нанести дезсредство (спрей) на грязные экраны, очки д пациента и переложить в раковину (для экспозиции). Пос окончания экспозиции промыть под проточной водой, вытере бумажными салфетками досуха.

1.3 Смочить ветошь дезсредством из локтевого дозатора и делим на 5 частей:

- 1 - на тумбочку;
- 2 - на лампу и блок с наконечниками;
- 3 - на блок ассистента и плевательницу;
- 4 - на кресло пациента;
- 5 - стулья врача и ассистента.

1.4 Собрать мусор с тумбочки и выбросить в плевательницу.

1.5 Собрать весь инструмент и перчатки врача в лоток д грязного инструментария, для транспортировки в ЦСО.

1.6 Снять все боры и насадки со скалера и наконечникс положить в контейнер для грязных инструментов. При работе переносным скалером (лагуна и верхний склад) накрути насадку вручную 4-5 оборотов, ключом зафиксировать оборота. Откручивать сначала ключом 2 оборота, затем открути вручную.

1.7 Турбинный, угловой и прямой наконечники снять полностью положить в емкость для грязного инструментария.

1.8 Закрыть и обработать Алмадезом весь материал, которе работал врач: флаконы, тубики, баночки, шприцы с материало дезсредством и положить в стол.

1.9 Боры ПРАВИЛЬНО расставить по ячейкам БИКСА ДЛЯ БОРОВ кабинете.

1.10 Выбросить слюноотсос и пылесос, если использовались.

**2. ТУМБОЧКА**

2.1 Убрать с тумбочки все пузырьки. Поднять стекло. Продуть пустером углы тумбочки.

2.2 Протереть тумбочку сверху, стекло с двух сторон.

страница 1 / 4

## Алгоритмы работы. Этап 1

2.3 Протереть все пузырьки и расставить на тумбочку инструкции.

2.4 Накрыть тумбочку по алгоритму (набор, боры, зеркала, пинцет).

1 ящик

2.5 Из ящика убрать все материалы (вскрытые положить в бокс для грязных инструментов на перестерилизацию). Протереть ящик ветошью с дез.средством.

2.6 Доложить все материалы в ящик по инструкции.

2 ящик

2.7 Из ящика убрать все материалы. Протереть ящик, лоток.

2.8 Вернуть материалы в ячейки. Бум. и Гут. Штифты разложить по порядку по инструкции.

3 ящик

2.9 Убрать из ящика все лотки с материалами.

2.10 Продуть пустером углы ящика. Протереть ящик внутри дез.средством.

2.11 Каждую ячейку продуть пустером, чтобы убрать мусор. Если есть потеки или другие загрязнения (кровь, следы от копирки, ж/т, протравка), протереть дез.средством.

2.12 Ячейки поставить обратно в ящик. Проверить, чтобы медикаменты лежали на своих местах по инструкции.

4 ящик

2.13 Убрать все из ящика. Ящик протереть дез.средством. Вернуть все материалы в ящик. По необходимости доложить материалы.

2.14 Протереть боковые и заднюю стороны тумбочки, переднюю часть + ручки ящиков.

## 3. УСТАНОВКА

3.1 Протереть дез.средством лампу: стекло (передняя поверхность лампы), заднюю поверхность лампы, ручки и рукава до основания установки.

## Алгоритмы работы. Этап 1

3.2 Протереть зеркало для пациента. Затем промыть водой, протереть сухой салфеткой (чтобы не было разводов). Протереть поверхность панели с наконечниками, боковые и заднюю стороны панели, пустер (Носик снять и отнести в ЦСО на обработку), гнездо пустера, шланги (провода) наконечников, скалера гнезда под ними. Рукав установки протереть.

3.3 Убрать плевательницу в ведро для отходов класса «Б». Протереть насадки, шланги слюноотсоса, пылесоса и пустер (бордовый, лагуна, серый, лазурный, бежевый), все гнезда для шлангов, плевательницу, место рядом с пациентом, стену возле плевательницы.

3.3.1 Промыть шланги слюноотсоса и пылесоса горячей водой (5 литров). 5 минут не ставить шланги в гнезда, чтобы дать им просохнуть. Снять насадки от слюноотсоса и пылесоса, вынуть фильтр из установки (положить их в ведро. После в сестринский кабинет или в ЦСО заложить в дез.раствор на дезинфекцию.)

3.4 Протереть кресло установки: подголовник впереди и сзади, металлическое соединение между подголовником и креслом, спинку впереди и сзади, подлокотники, сиденье. Поднять кресло до упора вверх. Протереть держатель кресла, нижнюю панель под креслом.

3.5 Протереть стулья врача и ассистента: спинку впереди и сзади, соединение спинки с сиденьем, сиденье, регулятор высоты.

3.6 Протереть педаль и провод от установки, ножки стульев врача и ассистента.

3.7 Снять перчатки (положить их в контейнер для грязного инструментария. После разбора инструментов этими перчатками в ЦСО, выбросить их в отходы класса «Б»).

3.8 Доложить необходимый материал в тумбочку.

3.9 Доложить весь нестерильный материал на установку (салфетки бумажные, для пациента, стаканчик и тд.).

3.10 Собрать вскрытые упаковки с ватными валиками, марлевыми шариками и отнести в ЦСО на перестерилизацию.

3.11 Отнести контейнер с использованными инструментами, турбинным наконечником в ЦСО.

## 4. РАЗБОРКА КОНТЕЙНЕРА В ЦСО

страница 3 / 4

(с) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-01-02 03:23

URL: [https://edu.smileterritory.ru/content/79/52/ru/instrukcia-№12-br-\\_obrabotka-kabineta-posle-pacientabr-\\_vecernaa-uborka.html](https://edu.smileterritory.ru/content/79/52/ru/instrukcia-№12-br-_obrabotka-kabineta-posle-pacientabr-_vecernaa-uborka.html)

## Алгоритмы работы. Этап 1

4.1 Разобрать контейнер с инструментами, и заложить их в емкость для дезинфекции. Положить Зеркало в отдельную емкость для обработки зеркал.

4.2 Боры поставить на мойку в биксе. Если боры в россыпи сложить их в сеточку для дезинфекции (также на мойку).

4.3 Разобрать карпульный шприц. Вытащить карпулу, крампон снять карпульную иглу и поместить их в контейнер отходов класса Б.

4.4 Обработать турбинный, угловой и прямой наконечники Алмадезом и продуть в продувочной машинке.

4.5 Заpackовать турбинный наконечник в упаковочную бумагу положить в корзину для стерилизации. (Если врач работает завтра в 1 смену, и наконечника стерильного нет, то заpackовать стерильную бумагу и положить в индивидуальный бокс врача).

4.5.1 Отнести угловой и прямой наконечники в сестринскую. Вставить в наконечники боры и положить в ячейки соответственно кабинету (номеру кабинета).

4.6 Отмыть и упаковать личную эндодонтию врача (врачей). Подписать инициалы врача и асс/мс, положить в корзинку для стерилизации.

4.7 Отмыть щетками и ершиком насадки на слюноотсос пылесос, фильтр после дезинфекции. Отнести в кабинет, поставить на установку.

### 5. Общее

5.1 Выключить рециркулятор, кондиционер.

5.2 Заполнить бланк заказа на получение материалов эндодонтии врача (врачей) со склада. Положить бланк в корзину в сестринской.

5.3 Принести из сестринской стерильный носик для пустаер положить на тумбочку в кабинет.

Уникальный ID ответа: #1051

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-01-20 11:23  
страница 4 / 4

(с) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-01-02 03:23

URL: [https://edu.smileterritory.ru/content/79/52/ru/instrukcia-№12-br-\\_obrabotka-kabineta-posle-pacientabr-\\_vecernaa-uborka.html](https://edu.smileterritory.ru/content/79/52/ru/instrukcia-№12-br-_obrabotka-kabineta-posle-pacientabr-_vecernaa-uborka.html)