

# **Алгоритмы работы. Этап 1**

## **Инструкция № 2**

### **Обработка зеркал для фотопротокола**

- 1 Перед тем как делать фотопротокол, нужно осмотреть зеркало, если есть развод шарик, смочить его спиртом, и протереть зеркало (можно просушить из пистолета, подсохло). Если врач работает с ассистентом -это делает ассистент, если без, то с
- 2 После фотопротокола каждое зеркало завернуть по отдельности в бумажное пол около раковины.
- 3 Аккуратно положить зеркала вместе с салфеткой в бокс для отработанных инструментов и отнести в ЦСО.
- 4 Заложить их в емкость для обработки зеркал на 15 минут.
- 5 Санитарки после дезинфекции промывают под проточной водой, затем деминера
- 6 Насухо вытирают чистой ветошью, упаковывают и стерилизуют на режиме 121С.
- 7 Разложить в ящик для зеркал в ЦСО (класть на ребро).

Уникальный ID ответа: #1086

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2024-12-05 11:06