

# Алгоритмы работы. Этап 1

## Инструкция № 9 Наконечники доктора

**Где находится?**

**Действия в кабинете**

**Как обрабатывать?**

**Действия санитарок ЦСО**

**Действия медсестер**

В личном боксе врача.

После приема (при использовании наконечника) открутить наконечник и аккуратно положить в бокс для грязного инструмента.

1. Протереть Алмадезом.

2. Продуть воздухом в продувочной машине.

3. Повторно протереть Алмадезом.

Запаковать в крафт-ламинат-бумагу (попросить санитарку).

Положить в корзину в ЦСО на стерилизацию.

Заложить инструменты в автоклав в стерилизацию. Печать проставить, подпись. Положить в комнату выгрузки индивидуальных наконечников.

Забрать наконечники из ячейки в ЦСО, разложить в лотки.

Уникальный ID ответа: #1093

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2024-12-05 11:09