

Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 9 Наконечники доктора

Где находится?

Действия в кабинете

Как обрабатывать?

Действия санитарок ЦСО

Действия медсестер

В личном боксе врача.

После приема (при использовании наконечника) открутить наконечник и аккуратно положить в бокс для грязного инструмента.

1. Протереть Алмадезом.

2. Продуть воздухом в продувочной машине.

3. Повторно протереть Алмадезом.

Запаковать в крафт-ламинат-бумагу (попросить санитарку).

Положить в корзину в ЦСО на стерилизацию.

Заложить инструменты в автоклав в стерилизацию. Печать проставить, подпись. Положить в комнату выгрузки индивидуальных наконечников.

Забрать наконечники из ячейки в ЦСО, разложить в лотки.

Уникальный ID ответа: #1093

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:09