

# Алгоритмы работы. Этап 1

## Инструкция № 10

### Обработка ортодонтических зеркал

- 1 После того, как врач отработал ортодонтическим зеркалом, нужно отложить зеркала около раковины, обязательно положить под него салфетку.
- 2 После окончания приема убрать весь грязный инструментарий в бокс для грязных инструментов, зеркало орошить Алмадезом. Оставить на 15 минут для дезинфекции.
- 3 После экспозиции 15 минут промыть под проточной водой.
- 4 Просушить сухой ветошью или воздухом из пюстера.
- 5 Положить в пластиковую коробку для зеркала.

Уникальный ID ответа: #1094

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:09