

# Алгоритмы работы. Этап 2

## Инструкция № 2

### По обработке мелкого дорогого инструментария

#### 2.1 Эндонасадки и эндочаки (+ключ)

##### Где находятся?

В сестринской в ящике для стерильной имплантации. Эндочаки и ключи в красном, фиолетовом, бежевом.

##### Как выдавать?

В журнал «бриллиантики» дату, ФИО доктора, кому кто берет, записать номер насадки и ключа.

##### Действия в кабинете

Открутить сначала носик эндочака, чтобы вынуть, открутить сам эндочак, положить в бокс для грязных ЦСО.

##### Как обрабатывать?

Положить эндочак и ключ в сеточку для замачивания трансферов, отверток, насадок и ключей. «бриллиантики», что вернули насадку и ключ, кто в подпись.

##### Действия санитарок ЦСО

Отмыть эндочак и ключ через 15 минут дезинфекции водой, затем деминерализованной, просушить и крафт-ламинат-бумагу, заложить в металлический. После стерилизации пропечатать, положить в бокс ячейку для прочих материалов в комнате выдачи.

#### 2.2 Насадки на пьезоаппарат

##### Где находятся?

На верхнем складе.

##### Как выдавать?

Взять на верхнем складе нужную насадку и ключ, номер насадки, ключ, кто взял, для какого врача. (на складе).

##### Действия в кабинете

Положить насадку и ключ в бокс для грязных инструментов. Ключ заложить в общий бокс для дезинфекции хир. насадки в бокс для личной эндодонтии врача, кому. Через 15 минут дезинфекции отмыть насадки, промыть, затем деминерализованной. Просушить, запечатать. Подписать ФИО врача, ФИО асс, сделать фото на группу вайбер асс и мс, и положить в металлический бокс.

##### Как обрабатывать?

##### Действия санитарок ЦСО

После стерилизации пропечатать дату «до»-«по» и положить в цсо, 1 ящик, в бокс «прочее для стерильных инструментов».

##### Действия медсестер

Забрать стерильные инструменты из бокса «для имплантации», разложить по ч/л мс на верхний склад. Насадки, кто ответственный принял насадки, какие

#### 2.3 Насадки на каламус, бифил (МБП, красный кабинет)

## Алгоритмы работы. Этап 2

**Где находятся?**

Насадки на каламус находятся в столике для БИ (БИФИЛ), МБП находятся в боксе, в кабинете «Лагуна».

**Как выдавать?**

Не выдаются. Лежат на своих местах, прописаны в кабинете, МБП-лагуна).

**Действия в кабинете**

Насадки на каламус - мс или асс, ответственный работает врач, приносит насадку в ЦСО,

**Как обрабатывать?**

Заложить в бокс для дезинфекции личной эндодезинфекции, насадку отмыть, промыть под деминерализованной, просушить, запаковать. Подписать ФИО врача, ФИО асс (мс), положить в стерилизации. Насадки на каламус МБП после исполнения заложить в бокс для инструментов лагуны.

**Действия санитарок ЦСО**

Через 15 минут дезинфекции отмыть насадки, промыть затем деминерализованной, просушить, запечатать. Положить в металлический бокс для стерилизации насадки пропечатать («до»-«после») , поставить по «лагуна»-в ящик для инструментов «лагуна», насадке номер 1,2,3,4,5+буква «К»-красный)- в ящик. Забрать стерильные инструменты из ящика с инструментами, разложить по местам нахождения.

**Действия медсестер**

### 2.4 Ключи, отвертки

**Где находятся?**

В сестринской на столе боксы.

**Как выдавать?**

МС/АСС- взять отвертку и ключ, на крышке бокса стерильным маркером отметить дату, ФИО врача, ФИО асс, мс. Готовить отвертки и ключа.

**Действия в кабинете**

После использования отвертки, ключи положить в бокс инструментов, принести в ЦСО.

**Как обрабатывать?**

Положить отвертку и ключ в сеточку для замачивания в индивидуальный бокс врача. Через 15 минут отмыть и стерилизацию.

**Действия медсестер**

Забрать инструменты из бокса «Прочее для стерильных инструментов» сестринской разложить отвертки и ключи в бокс стерильных инструментов боксе вычеркнуть информацию о том, что брал ответственный.

### 2.5 Насадка на коронкосниматель

**Где находится?**

На верхнем складе в ячейке для насадок на коронкосниматель.

**Как выдавать?**

Взять коронкосниматель, насадку на коронкосниматель «Бриллиантики» внести дату, ФИО врача, номер коронкоснимателя, номер насадки.

**Действия в кабинете**

Открутить насадку от коронкоснимателя. Положить насадку в бокс инструментов. Отнести в ЦСО.

**Как обрабатывать?**

Коронкосниматель обработать ветошью, смоченной в дезинфекции, верхний склад в ячейку для коронкоснимателя. Написать на этикетке трансферов, отверток, насадок и ключей. Сообщить в кабинет.

## Алгоритмы работы. Этап 2

### Действия санитарок ЦСО

заложили на дезинфекцию.

Через 15 минут дезинфекции отмыть отвертки проточной водой, затем деминерализованной, просушить на ламинат-бумагу. Положить инструменты в мешок для стерилизации. После стерилизации пропечатать подпись.

### Действия медсестер

Положить насадку в бокс «Прочее для стерилизации». Забрать инструменты из бокса «Прочее для стерилизации». Положить в верхний склад в ячейки для насадок. В журнале «Бриллиантики» отметить, что вернули на место.

Уникальный ID ответа: #1100

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2024-12-05 13:22