

Алгоритмы работы. Этап 2

Инструкция № 7

Насадки для сканера (MEDIT / 3SHAPE)

Где находится?

Как выдавать?

Действия в кабинете

Как обрабатывать?

Действия медсестер

ВАЖНО!!!

В сестринской в шкафу.

Взять насадку на сканер. В журнал «Бриллиантики», в ФИО врача, ФИО асс/мс, кто взял.

После использования снять насадку, отнести в сестринскую. Промыть водой в течении 2 мин и протереть салфеткой со спирте. Обработать зеркало и все стенки насадки внутри пустера.

Просушить, запечатать в стерильную крафт-ламинат-«до»-«после», и положить в подписанный бокс для насадок (MEDIT или 3SHAPE) на полку в шкаф. Отметить в журнале вернул, состояние, подпись мс/асс.

НАСАДКУ НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ И НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ. АККУРАТНО ОБРАЩАТЬСЯ С НАСАДКОЙ, ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ, ТАК ЖЕ АККУРАТНО ЗАПАКОВЫВАТЬ, ЗАПЕЧАТАТЬ, ЗЕРКАЛО!!!

Уникальный ID ответа: #1105

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 14:08